

Butterfly iQ Orientierungshilfen für Ansichten (nur unterstützte Geräte)

Die Werkzeuge zur Orientierungshilfe für Ansichten bieten den Benutzern während der Untersuchung mit Butterfly iQ visuelle Angaben zur Bildqualität. Die Werkzeuge zur Orientierungshilfe für Ansichten unterstützen folgende Ansichten: Apikale 4-Kammer-Herzansicht, Ansichten der parasternalen langen Achse, der parasternalen kurzen Achse sowie A-Linien-/B-Linien-Ansicht der Lunge. Während der Ultraschalluntersuchung des Patienten liefert das Werkzeug ein Echtzeit-Feedback. Es gibt den Anteil der Experten an, welche die anatomische Ansicht als messbar einschätzen würden.



VORSICHT!

Die Werkzeuge zur Orientierungshilfe für Ansichten sind ausschließlich für Schulungszwecke vorgesehen.

Kompatibilität

Die Orientierungshilfe für Ansichten wird von allen mit Butterfly iQ kompatiblen iOS-Geräten unterstützt:

Unterstützte Mobilversionen: iOS Version 12.0 oder höher

Zugriff auf die Orientierungshilfe für Ansichten

Sie können in der Einstellung „Herz“ oder „Lunge“ während der Untersuchung im B-Modus auf die Werkzeuge zur Orientierungshilfe für Ansichten zugreifen.

Tippen Sie unten rechts auf **Aktionen**

Wählen Sie im Abschnitt „Orientierungshilfe für Ansichten“ aus folgenden Werkzeugen:

- Einstellung „Herz“: Apikale 4-Kammer, parasternale lange Achse sowie parasternale kurze Achse
- Einstellung „Lunge“: A-Linien/B-Linien

Ausschalten der Orientierungshilfe für Ansichten

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Werkzeug mit Tippen auf das **X** auszuschalten, nämlich während Sie:

- Im B-Modus scannen
- Sich im Aktionsmenü befinden