

Orientación en exploraciones didácticas con Butterfly iQ (solo para dispositivos compatibles)

Las herramientas de orientación para exploraciones didácticas proporcionan a los usuarios una indicación visual de la calidad de la imagen cuando exploran con Butterfly iQ. Las herramientas de orientación para exploraciones didácticas pueden utilizarse en las siguientes vistas: apical tetracameral, eje largo paraesternal, eje corto paraesternal y líneas A/líneas B pulmonares. La herramienta le proporciona información en tiempo real mientras explora al sujeto. Indica la proporción de expertos que considerarían medible la vista anatómica.



¡PRECAUCIÓN!

Las herramientas de orientación para exploraciones didácticas son solo para uso formativo.

Compatibilidad

La orientación en exploraciones didácticas puede utilizarse en todos los dispositivos con iOS compatibles con Butterfly iQ.

Soporte móvil: versión de iOS 12.0 o superior

Accediendo a orientación en exploraciones didácticas

Se puede acceder a las herramientas de orientación en exploraciones didácticas cardíacas o pulmonares en modo B.

Pulse **Acciones** , que está situado en la esquina inferior derecha.

Tiene la opción de seleccionar las siguientes herramientas de la sección de Orientación en exploraciones didácticas:

- Ajuste predeterminado cardíaco: apical tetracameral, eje largo paraesternal y eje corto paraesternal
- Ajuste predeterminado pulmonar: líneas A/líneas B

Desactivando orientación para exploración didáctica

Las herramientas de orientación para exploraciones didácticas pueden desactivarse pulsando **X** en la herramienta durante:

- Exploración en modo B
- O en el menú de Acciones