

# Butterfly iQ Koulutusnäkömön opastus (vain tuetut laitteet)

Koulutusnäkömön opastus -työkalut näyttävät käyttäjille visuaalisesti kuvan laadun, kun hän skannaa Butterfly iQ -sovelluksella. Koulutusnäkömön opastus -työkalut tukevat seuraavia näkömiä: sydämen apikaalinen nelikammio, parasternaali pitkä akseli ja parasternaali lyhyt akseli sekä keuhkon A-linja-/B-linjanäkömä. Työkalu antaa reaaliaikaisen palautteen skannauksen aikana. Se osoittaa niiden asiantuntijoiden osuuden, jotka arvioisivat, että anatominen näkömä on mitattavissa.



## **HUOMIO!**

Koulutusnäkömön opastus -työkalut on tarkoitettu vain opetuskäyttöön.

## **Yhteensopivuus**

Kaikki Butterfly iQ -yhteensopivat iOS-laitteet tukevat koulutusnäkömön opastus -työkaluja:

Mobiilituki: iOS-versio 12.0 tai uudempi

## **Koulutusnäkömön opastuksen käyttö**

Koulutusnäkömön opastus -työkaluja voi käyttää sydän- tai keuhko-esiasetuksen kautta B-tilassa skannattaessa.

Napauta **Toiminnot**  oikeasta alakulmasta.

Voit valita seuraavat työkalut koulutusnäkömön opastus -osiosta:

- Sydän-esiasetus: apikaalinen nelikammio, parasternaali pitkä akseli ja parasternaali lyhyt akseli
- Keuhko-esiasetus: A-linjat/B-linjat

## **Koulutusnäkömön opastus -työkalujen poistaminen käytöstä**

Koulutusnäkömön opastus -työkalut voi poistaa käytöstä napauttamalla **X** työkalussa, kun:

- Skannaat B-tilassa
- Tai Toiminnot-valikossa