

# Butterfly iQ Guidage éducatif (appareils pris en charge uniquement)

Les outils de guidage éducatif donnent aux utilisateurs une indication visuelle de la qualité de l'image lors de l'acquisition avec le Butterfly iQ. Ces outils d'aide à la visualisation pédagogique sont disponibles sur les vues suivantes : vue cardiaque apicale 4 cavités, vue parasternale grand axe, vue parasternale petit axe et vue des lignes A/lignes B des poumons. Lorsque vous examinez le patient, l'outil vous fournit des informations en temps réel. Il vous indique ainsi le pourcentage d'experts qui considéreraient la vue anatomique comme mesurable.



## **MISE EN GARDE !**

Les outils de guidage éducatif sont réservés à un usage pédagogique.

### **Compatibilité**

Le guidage éducatif est pris en charge sur tous les appareils iOS compatibles avec le Butterfly iQ :

Prise en charge mobile : iOS version 12.0 ou ultérieure

### **Accès au guidage éducatif**

Les outils de guidage éducatif sont accessibles dans les préférences Cardiaque et Poumon lors de l'acquisition en mode B.

Appuyer sur le bouton **Actions**  situé dans le coin inférieur droit.

Vous avez la possibilité de sélectionner les outils suivants dans la section « Guidage éducatif » :

- Préférence Cardiaque : vue cardiaque apicale 4 cavités, vue parasternale grand axe et vue parasternale petit axe
- Préférence Poumon : lignes A/lignes B

### **Désactivation du guidage éducatif**

Les outils de guidage éducatif peuvent être désactivés en appuyant sur le **X** :

- Lors de l'acquisition en mode B
- Dans le menu des actions