

# Guida alla visuale didattica di Butterfly iQ (solo su dispositivi supportati)

Gli strumenti didattici di guida alla visuale forniscono agli utenti un'indicazione visiva della qualità dell'immagine durante le ecografie con Butterfly iQ. Visuali supportate: 4 camere apicale, Parasternale asse lungo, Parasternale asse corto e Linee A/Linee B polmonari. Durante l'ecografia, lo strumento fornisce un feedback in tempo reale, indicando la percentuale di esperti che riterrebbero la visuale anatomica misurabile.



## **ATTENZIONE!**

Gli strumenti di guida alla visuale sono per solo uso didattico.

### **Compatibilità**

La Guida alla visuale didattica è supportata solo su dispositivi iOS compatibili con Butterfly iQ:

Supporto per dispositivi mobili: iOS 12.0 o più recente

### **Accesso alla guida alla visuale didattica**

Gli strumenti didattici di guida alla visuale sono accessibili tramite i preset polmonare o cardiaco durante le ecografie in B-Mode.

Tocca **Azioni**  nell'angolo in basso a destra.

Nella sezione di Guida alla visuale didattica puoi selezionare uno dei seguenti strumenti:

- Preset cardiaco: 4 camere apicale, parasternale asse lungo e parasternale asse corto
- Preset polmonare: Linee A/Linee B

### **Disattivazione della guida alla visuale didattica**

Gli strumenti didattici di guida alla visuale possono essere disattivati toccando la **X** sullo strumento:

- Durante un'ecografia in B-Mode
- Dal menu Azioni