

Butterfly iQ Geleiding educatieve weergave (alleen ondersteunde apparaten)

De tools voor Geleiding educatieve weergave bieden gebruikers een visuele indicatie van de beeldkwaliteit tijdens het scannen met de Butterfly iQ. De tools voor Geleiding educatieve weergave ondersteunen de volgende weergaven: Apicale 4-kameropname, Parasternale lange as en Parasternale korte as en A-lijnen/B-lijnen longen. Tijdens het scannen van het subject geeft de tool in real time feedback. Deze duidt het aantal experts aan die de anatomische weergave als meetbaar zouden beoordelen.



LET OP!

De tools voor Geleiding educatieve weergave zijn alleen bedoeld voor educatief gebruik.

Compatibiliteit

Geleiding educatieve weergave wordt ondersteund op alle Butterfly iQ-apparaten die geschikt zijn voor iOS:

Mobiele ondersteuning: iOS-versie 12.0 of nieuwer

Toegang Geleiding educatieve weergave

De tools voor Geleiding educatieve weergave zijn toegankelijk via de cardiale en longvooringstelling tijdens het scannen in B-modus.

Tik op **Acties**  in de rechteronderhoek.

U kunt de volgende tools selecteren in het gedeelte Geleiding educatieve weergave:

- Cardiale voorinstellingen: Apicale 4-kameropname, Parasternale lange as en Parasternale korte as
- Longvooringstellingen: A-lijnen/B-lijnen

Geleiding educatieve weergave uitschakelen

U kunt de tools voor Geleiding educatieve weergave uitschakelen door op **X** op de tool te tikken tijdens:

- Scannen in B-modus
- Of in het Actiemenu