

Butterfly iQ Veiledning for opplæringsvisning (kun støttede enheter)

Veiledningsverktøyene for opplæringsvisning gir brukere en visuell indikasjon på bildekvaliteten under skanning med Butterfly iQ. Veiledningsverktøyene for opplæringsvisning støtter følgende visninger: apikale firekammers hjertevisning, parasternal langakse, parasternal kortakse og A-linje/B-linje av lunge. Når du skanner pasienten, gir verktøyet deg tilbakemeldinger i sanntid. Den indikerer andelen spesialister som ville vurdere den anatomiske visningen som målbar.



FORSIKTIG!

Veiledningsverktøyene for opplæringsvisning er kun til pedagogisk bruk.

Kompatibilitet

Veiledning for opplæringsvisning støttes på alle Butterfly iQ-kompatible iOS-enheter:

Mobil støtte: iOS-versjon 12.0 eller nyere

Tilgang til Veiledning for opplæringsvisning

Det er mulig å gå til veiledningsverktøyene for opplæringsvisning i forhåndsinnstillingen for hjerte eller lunge mens du skanner i B-modus.

Trykk på **Handlinger**  nederst i høyre hjørne.

Du kan velge følgende verktøy fra delen Veiledning for opplæringsvisning:

- Forhåndsinnstilling for hjerte: apikal firekammer, parasternal langakse og parasternal kortakse
- Forhåndsinnstilling for lunge: A-linjer/B-linjer

Slå av Veiledning for opplæringsvisning

Veiledningsverktøyene for opplæringsvisning kan slås av ved å trykke på **X** på verktøyet mens du:

- Skanner i B-modus
- Eller i Handlingsmenyen