

Butterfly iQ Utbildningsvy vägledning (endast för enheter som stöds)

Utbildningsvy vägledningsverktygen förser användare med en visuell indikering av bildkvaliteten vid skanning av Butterfly iQ. Utbildningsvy vägledningsverktygen förser stödjer följande vyer: Hjärta apikal 4 kammare, Parasternalt lång axel och kort axel samt Lunga vy för A-linjer/B-linjer. När du skannar ämnet ger verktyget feedback i realtid. Den anger andelen experter som skulle bedöma den anatomiska vyn som mätbar.



FÖRSIKTIGHET!

Utbildningsvy vägledningsverktygen är endast avsedda för Utbildningssyfte

Kompatibilitet

Utbildningsvy vägledning stöds på alla Butterfly iQ-kompatibla iOS-enheter:

Mobilt stöd: iOS version 12.0 eller senare

Åtkomst till Utbildningsvy vägledning

Utbildningsvy vägledningsverktygen kan nås i hjärt- eller lunginställning medan du skannar i B-läge.

Peka på **Åtgärder**  i det nedre högra hörnet.

Du har möjlighet att välja följande verktyg i avsnittet Utbildningsvy vägledning:

- Förinställning Hjärta: Apikal 4 kammare, Parasternal lång axel och Parasternal kort axel
- Lugna förinställning: A-ledningar/B-ledningar

Stänga av Utbildningsvy vägledning

Utbildningsvy vägledningsverktygen kan stängas av genom att trycka på **X** i verktyget man:

- Skanning i B-läge
- Eller i Åtgärdsmenyn